

Self-Test
At Home
Results In
15 Mins

د کووید-19 د انټیجن بېرني معایناتو د استعمال لارښوونې

Step 1: Prepare Material


1 گام: مواد چمتو کړئ

تاسو ممکن په معایناتي بسته کې د معایناتي موادو 1 سیټ یا د معایناتي موادو 2 سیټ ولرئ. مهرباني وکړئ د ترلاسه شوي ځانګړي سیټ پر اساس په سم ډول لاندې ګامونه تعقیب کړئ.

د معایناتي موادو 2 مجموعه:

Test Set 2:

کڅوره خلاصه کړئ، په کڅوره کې د کووید-19 ټیسټ کارټ را واخلي، هغه پیپ چې لا له وړاندې له استخراجي محلول څخه ډک شوی وي راوکاږئ. کله چې تاسو د معایناتو ترسره کولو ته چمتو شئ، د کووید - 19 د معایناتي کارټ څخه پاکټ خلاص کړئ.

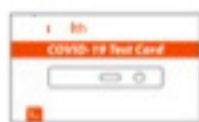

1 COVID-19 Test Card
in Pouch



1 Empty Tube and
1 Sealed Solution



1 Swab



1 COVID-19 Test Card
in Pouch



1 Pre Filled Tube



1 Swab

د معایناتو لومړۍ برخه:

Test Set 1:

بسته خلاصه کړئ، د کووید-19 معایناتي کارټ له کڅورې څخه را واخلي، خالي پیپ، مهر شوی محلول، او د معایناتو خاشه را وباسئ. کله چې تاسو د معایناتو ترسره کولو ته چمتو شئ، د کووید - 19 د معایناتي کارټ څخه پاکټ خلاص کړئ.

Step 2: Collect Sample

2 گام: نمونه را ټوله کړئ

A. د معایناتو خاشه له دې کڅورې څخه لیرې کړئ، دا په یاد لرئ چې د معایناتو د خاشې سر ته لاس مه وړ وړئ. مهرباني وکړئ د معایناتي خاشې کڅوره درسره وساتئ چې وروسته مو به کارېږي.



Right Nostril



Left Nostril



B. په نرمۍ سره د معایناتي خاشې ټوله جاذبه برخه (معمولا له 1/2 څخه تر 3/4 انچ پورې) خپلې پوزې ته دننه کړئ.

C. لږ تر لږه 5 ځلي یې د پوزې پر دیوال په کراره کراره په دایروي شکل سره وڅرخوئ. د نمونې راټولولو لپاره لږترلږه 15 ثانيې وخت وتیسئ او ځان په دې ډاډه کړئ چې د معایناتو په خاشه کې مو د پوزې اوبه راټولې شوې دي. د معایناتو له همدې خاشې څخه په استفاده د پوزې له بلې برخې څخه د نمونې راټولولو لپاره همدا کړنلاره تکرار کړئ. ډاډ ترلاسه کړئ چې د پوزې دواړې سرې د معایناتو په همدې یوه خاشه باندې برس کړئ.

Step 3: Process Sample


الخطوة الثالثة: باشر بالعينة

C. د پیپ دواړه اړخونه کنټرول کړئ تر څو د معایناتو له خاشې څخه د امکان تر حده ډېر مایع راووځي او بیا خاشه لیرې کړئ.

D. نارنجي لوی کیپ بیرته وپيچئ، د معایناتو خاشه بیرته کڅوره کې واچوئ. معایناتي خاشه او بسته په خوندي ډول تصفیه کړئ.

A. پیپ په عمودي ډول پر مېز کنټرول کړئ او د پیپ خلاصولو لپاره لوی نارنجي کیپ تاو کړئ.

B. د معایناتو خاشه پیپ ته دننه کړئ، د پیپ لاندې برخه د معایناتي خاشې په واسطه وموښئ او لږترلږه 15 ځله یې سره وښورئ.

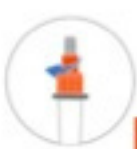

D

C



B

A




4 گام: نمونه اضافه کړئ

Step 4: Add Sample

د پیپ د کوچني سپین سرپوښ د خلاصولو لپاره هغه تاو کړئ. د نمونې 3 څاڅکي د کووید-19 معایناتي کارټ د نمونې څوکې ته اضافه کړئ. کوچنی سپین سرپوښ بېرته وتړئ.

6 گام: پایله وگورئ

Step 6: Read Results

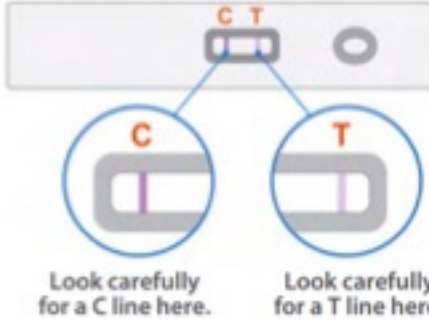

پایله باید د 30 دقیقو څخه وروسته ونه کتل شي (پایله په 2X غټ سائز کې و ښودل شي).

5 گام: 15 دقیقې انتظار وکړئ

Step 5: Wait 15 minutes

وروسته له دې چې د معایناتو لپاره نمونه د سیمپل څوکې ته ورسېږي، سملاسي په اېلیکیشن کې د "Start Timer" تڼۍ په کلیک کولو سره وخت قید کړئ. پایله به په 15 دقیقو کې چمتو شي.



Step 7: Test Result Explanation

7 گام: د معایناتو د پایلې توضیحات

Positive Result



مثبت پایله:

په مثبت پایله کې باید پر C (روښانه ارغواني) کرښه او T باندې (توره ارغواني) دواړه کرښې وي. مثبت پایله په دې معنی ده چې د کووید-19 وایرس کشف شوی او یاد شخص د کووید-19 معاینات مثبت دي.



هغه کسان چې معاینات یې مثبت وي باید ځان جلا کړي او د خپل ډاکټر یا روغتيايي پاملرنې چمتو کوونکي څخه د پاملرنې او روغتيايي تعقيب غوښتنه وکړي ځکه کېدای شي د اضافه معایناتو او د عامې روغتيا د راپور ورکولو ته اړتیا پیدا شي.

Negative Result



منفي پایله:

د منفي پایلې په صورت کې به یوازې پر C (روښانه ارغواني) کرښه وي.

منفي پایله په دې معنی ده چې د کووید-19 وایرس اټیجنونه نه دي موندل شوي او داسې گومان دی چې دا شخص کووید-19 نه لري.

- مهرباني وکړئ په یاد ولرئ چې په منفي پایله کې د کووید-19 احتمال نه رډېري
- د معایناتو د منفي پایلې په صورت کې: ټول ټولنیز واټن تعقيب کړئ، سپارښتنې عملي کړئ او محافظتي تدابیر ونیسئ. که په وایرس د ککړېدو شک دوام ومومي او/یا ستاسو لومړني معاینات منفي وي، د 1-2 ورځو وروسته بیا معاینات وکړئ او د خپل روغتيايي پاملرنې د چمتو کوونکي یا د کووید-19 د سیمه ایز مرکز سره مشوره وکړئ.

Step 8: Dispose of Test Kit

8 گام: د معایناتو کیت لیرې کړئ



See more at AnchoragePLNs.org

د معایناتو تر بشپړېدو وروسته، د کیت ټول مواد د څڼو په سطلي واچوئ



Translated by Alaska CSS Refugee Assistance & Immigration Services
Formatted by Alaska Literacy Program



This project was partially supported by a grant awarded by the Municipality of Anchorage, Anchorage Health Department. The opinions, findings, conclusions or recommendations expressed in this publication are those of the author and do not necessarily reflect the views of the Municipality of Anchorage, Anchorage Health Department.

